

omeoenergetica®

Il principio di Omeoenergetica:
la fine della cellulite.

Omeoenergetica: un'energia che nasce dalla ricerca scientifica.

La bellezza è prima di tutto sintomo di benessere. Quando invece i meccanismi fisiologici non funzionano in modo corretto, appaiono i problemi estetici. Alla loro origine ci sono molti e diversi fattori che si attivano a vicenda.

Solamente un processo specifico, che rilanci tutti i naturali meccanismi riparatori coinvolti, può offrire una soluzione efficace.

Per fare questo, occorrono due elementi fondamentali: **una ricerca di alto livello scientifico e tecnologico**, come quella attuata da Omeoenergetica, e **una professionista come te.**

Omeoenergetica mette a disposizione uno specifico strumento di lavoro per il trattamento della cellulite: Cellutrim plus.



La risposta di Omeoenergetica alla cellulite: Cellutrim plus.

Cellutrim plus è un'apparecchiatura professionale rivoluzionaria, brevettata e unica, che genera energia endogena e rilancia così le corrette funzionalità alterate dalla cellulite. Si basa su un principio utilizzato anche in Medicina e in Fisioterapia, che ha conquistato prestigiosi premi internazionali per l'innovazione tecnologica.

Cellutrim plus attiva i fattori endogeni di riparazione e interviene contemporaneamente sui meccanismi che generano:


- ritenzione di liquidi,
- gambe pesanti,
- cellulite fibro-edematosa.



Le reazioni endogene stimulate
da Cellutrim plus.




Un'azione totale contro gli inestetismi della cellulite.

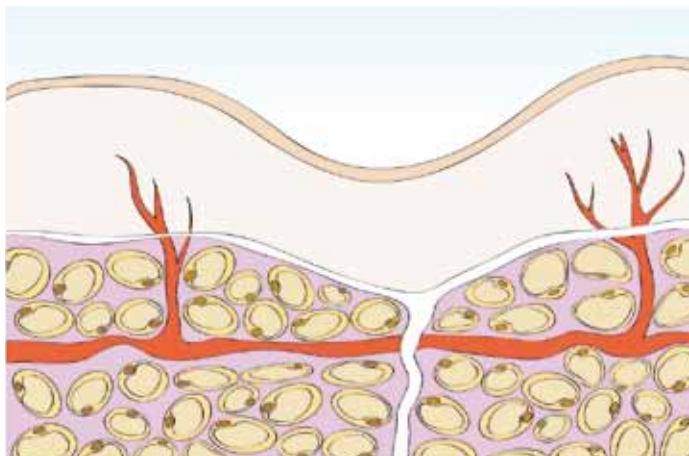

SEZIONE DI CUTE INTERESSATA DA CELLULITE.

Gli adipociti ipertrofici comprimono i vasi sanguigni e riducono la velocità del flusso e la portata dei vasi stessi. La matrice non può essere drenata efficacemente e si accumulano tossine e sostanze di scarto.

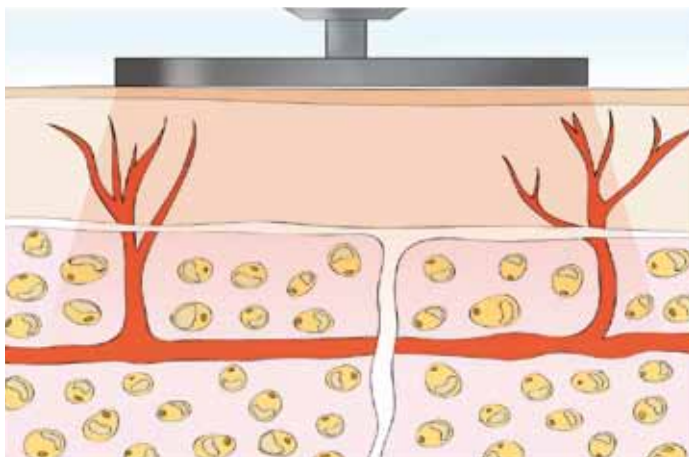

STESSA SEZIONE DI CUTE SU CUI AGISCE CELLUTRIM PLUS.

Gli adipociti si riducono di volume e viene ripristinato il regolare flusso sanguigno con conseguente drenaggio di tossine e liquidi in eccesso accumulati nella matrice.

Cellutrim plus agisce su tutte le strutture biologiche responsabili della formazione della cellulite.

Nel distretto microcircolatorio-linfatico:

- Aumenta la velocità di flusso sanguigno.
- Ripristina l'elasticità e la permeabilità delle pareti dei capillari.
- Elimina il ristagno dei liquidi nei capillari.

Nella matrice

(interstizio, gel mucopolisaccaridico):

- Libera il tessuto interstiziale, favorendo l'eliminazione delle tossine.
- Rende più fluido il gel "solidificato", facilitando il naturale ricambio cellulare.

Nel tessuto adiposo:

- Migliora le condizioni circolatorie e l'ossigenazione.
- Ristabilisce la temperatura necessaria per rilanciare la scissione dei grassi.
- Restituisce all'adipocita il corretto ricambio, limitandone l'aumento di volume.
- Interrompe la formazione di tessuto fibrotico.

Come funziona Cellutrim plus.

Cellutrim plus sfrutta un ben noto principio fisico per indurre fisiologiche trasformazioni elettrochimiche nei tessuti biologici. Le cellule dei tessuti e dei fluidi biologici sono caricate elettricamente, hanno cioè delle cariche ioniche positive o negative, che si alternano continuamente per consentire il normale svolgimento delle attività biologiche. Ogni attività avviene quindi grazie a modifiche dell'equilibrio elettro-chimico.

Applicando la fonte di energia di Cellutrim plus, le cariche vengono attratte e respinte ben 485.000 volte al secondo. Si produce così, **in profondità** e con una propagazione dall'interno verso l'esterno, **energia bio-compatibile e bio-disponibile**. Non solo l'energia è generata direttamente dai tessuti ma è anche utilizzabile dagli stessi.

Cellutrim plus induce quindi l'organismo a produrre l'energia necessaria a riportare in equilibrio le numerose funzioni coinvolte e a invertire la sequenza che ha generato l'inestetismo.

Sistema capacitivo e sistema resistivo.

Per la prima volta, grazie a Cellutrim plus è possibile **agire selettivamente sui tessuti colpiti dalla cellulite**. In base alle loro differenti caratteristiche, si utilizzano infatti due diversi sistemi brevettati da Omeoenergetica.

A seconda dei livelli energetici attivati, si innescano reazioni differenti.

- **A bassi livelli energetici:** aumentano le trasformazioni energetiche (sintesi di ATP) e il consumo di O_2 . Il tessuto ha maggiori necessità metaboliche e viene quindi attivato il microcircolo.
- **A medi livelli energetici:** aumenta l'effetto di biostimolazione dovuto a un maggior movimento, si innalza il fabbisogno di ossigeno e il corpo reagisce con la vasodilatazione.
- **Ad alti livelli energetici:** aumenta la temperatura endogena, con conseguente stimolo del flusso emolinfatico e trasformazione dei noduli fibrosi.



SISTEMA CON ELETTRODO CAPACITIVO.

Ideale per trattare i **tessuti di tipo "molle"**, come quelli dei sistemi vascolare/linfatico, cutaneo e muscolare.



SISTEMA CON ELETTRODO RESISTIVO.

Consigliabile per i **tessuti di tipo "duro"**, come quelli dei noduli fibrosi.

Cellutrim plus è efficace anche sulla cellulite fibrosclerotica.

Come dimostra l'esperienza della pratica quotidiana, la cellulite fibrosclerotica rappresenta la tipologia più difficile da trattare.

I noduli sono il risultato evidente dell'alterazione della struttura delle fibre del derma. Il difetto microcircolatorio, a volte protratto per anni, e il conseguente edema, innescano una risposta di tipo infiammatorio e reattivo: per un meccanismo di difesa, le fibrille di collagene, normalmente organizzate in modo ordinato e funzionale, si uniscono con legami anomali e si compattano in **miconoduli fibrosi**. Negli stadi più avanzati, i miconoduli si uniscono diventando sempre più compatti, sino a

formare **macronoduli incapsulati**, ben visibili e palpabili, nonché molto dolorosi alla pressione.

Il sistema resistivo di Cellutrim plus agisce sui punti più resistenti ed elimina i legami interni ai noduli, riportando i tessuti alla loro struttura naturale.

La deformazione della superficie cutanea viene drasticamente ridotta grazie al riposizionamento (rilassamento) dei tralci connettivali.

La pelle riacquista così un aspetto omogeneo e compatto, sin dalla prima seduta.



Cellutrim plus e I-Cell: l'importanza di un'azione sinergica.

Il tessuto adiposo ha sempre un ruolo centrale nella formazione della cellulite, in tutti i suoi diversi stadi di sviluppo.

Agire sugli adipociti grazie a Cellutrim plus, in modo diretto e specifico, è quindi fondamentale.

E il trattamento diventa ancora più efficace se integrato e coadiuvato dall'utilizzo della linea di prodotti I-Cell, formata da: **Siero Intensivo**, **Crema Intensiva** e **Olio aromatico idrosolubile** con azione drenante per il bagno. Cellutrim plus e I-Cell agiscono con un meccanismo diverso ma ugualmente intenso.

Perché utilizzare I-Cell?

I-Cell è una formulazione elaborata da Omeoenergetica, in grado di mantenere

attivi e di stimolare ulteriormente, tra una seduta e l'altra, i processi risvegliati dal trattamento con Cellutrim plus.

Usati con continuità, e associati a semplici tecniche manuali, i prodotti I-Cell riducono i cuscinetti adiposi e favoriscono lo smaltimento delle tossine.

Abbinando un trattamento con Cellutrim plus all'applicazione di I-Cell, la prima sensazione che proverà la tua cliente sarà quella di una grande leggerezza alle gambe. E se a tutto questo si associano dieci minuti di movimento tutti i giorni, la sensazione si trasformerà in un risultato che dura nel tempo.







I-Cell. Dove le altre creme si fermano, Omeoenergetica inizia.

Il principio attivo di I-Cell è una molecola specializzata, frutto di una lunga ricerca scientifica volta a trovare una sostanza, efficace ma al tempo stesso innocua, in grado di promuovere l'attività metabolica dell'adipocita. Ecco cosa accade nel tessuto adiposo grazie all'azione su specifici recettori ed enzimi:

- Vengono liberate e rese disponibili delle sostanze vasoattive, che hanno cioè la funzione di stimolare la microcircolazione.
- Viene riattivato il metabolismo della cellula, con scioglimento del grasso e conseguente ripristino della sua corretta funzione di produzione energetica.
- Viene facilitato il compito del sistema emo-linfatico di drenare grasso mobilizzato, liquidi e scorie, portando alla regressione dell'edema dell'interstizio.

La diminuzione in cm dell'area trattata e il visibile e palpabile miglioramento cutaneo ne sono la prova oggettiva.

I-Cell è disponibile in due versioni, una per l'uso in cabina e una per l'uso domestico.

Formulazioni da cabina

I-Cell Crema Intensiva.

L'emulsione ha una particolare consistenza, molto ricca di oli nobili,

che favorisce il massaggio professionale e veicola il principio attivo nei tessuti profondi, laddove è necessario agire per contrastare la cellulite.

Formulazioni per uso domestico

I-Cell Crema Intensiva, grazie alla sua particolare consistenza, si rivela particolarmente adatta anche per ottimizzare i risultati nell'utilizzo a casa. Applicando la Crema I-Cell con un leggero massaggio, si può contribuire a ripristinare una corretta funzionalità cutanea, riportando ossigeno in superficie e stimolando la microcircolazione.

I-Cell Siero Intensivo.

A base acquosa, è dotato di una concentrazione di principi attivi molto elevata; va usato subito prima della Crema di cui potenzia l'azione.

I-Cell Olio aromatico idrosolubile per il Bagno.

Basato su principi attivi naturali ricavati da piante officinali, potenzia i benefici che il momento del bagno reca già di per sé all'organismo. Sciolto nell'acqua della vasca, frizionato con un guanto umido sotto la doccia o usato per un pediluvio, viene assorbito per via cutanea ed innesca, attraverso il sistema olfattivo, una complessa serie di reazioni che rimette in moto il sistema energetico di tutto l'organismo.



Risultati senza dolore.

Un importante vantaggio di Cellutrim plus è che agisce anche sulla cellulite più difficile attraverso sedute non solo indolori, ma anche piacevoli.

I recettori cutanei del dolore sono distribuiti su tutto il corpo, con sensibilità specifica alla pressione, al caldo e al freddo: quando si agisce ripetutamente sulla cute, si attua uno stimolo sulle terminazioni nervose che veicolano il segnale di dolore in modo sempre più diffuso e intenso. È solo evitando dall'interno tali

recettori, come avviene nel meccanismo d'azione di Cellutrim plus, che si può evitare di innescare delle reazioni fastidiose, oltre che nocive.

Grazie all'assenza di dolore, è possibile agire più intensamente e ripetere i trattamenti con maggiore frequenza.

Le tue clienti raggiungeranno i risultati desiderati senza soffrire e apprezzeranno ancora di più il tuo lavoro e la tua professionalità.



Risultati dal primo trattamento.

Ogni giorno, il lavoro di estetista mette di fronte a problemi diversi: cellulite a differenti stadi di evoluzione, formicolii, sensazione di gambe pesanti e intorpidimento, sensazione di freddo alle estremità per circolazione difettosa, generale appesantimento per ritenzione idrica e così via. Queste manifestazioni richiedono normalmente, con le tradizionali tecniche, tempi di trattamento diversi. Eppure le tue clienti pretendono tutte, immancabilmente, risultati immediati.

Cellutrim plus garantisce finalmente cambiamenti visibili sin dalla prima seduta.

Una nuova sensazione di leggerezza.

Le tue clienti la percepiranno subito, in modo particolare alle gambe. Questo perché i meccanismi alterati, da cui derivano ritenzione e gonfiore, hanno iniziato un percorso

di recupero funzionale.

Plasticità omogenea.


La cute apparirà più liscia e compatta, perché derma e ipoderma si sono ricompagnati.

Maggiore vitalità.

I trattamenti di Omeoenergetica non si limitano al solo recupero estetico, ma coinvolgono tutto l'organismo, all'insegna di una nuova vitalità e una voglia di muoversi, mai sperimentate prima.

Una grande fiducia.

Le tue clienti recupereranno una grande fiducia nel loro potenziale di bellezza. Ma soprattutto in te, che hai saputo offrire loro benefici immediatamente visibili.

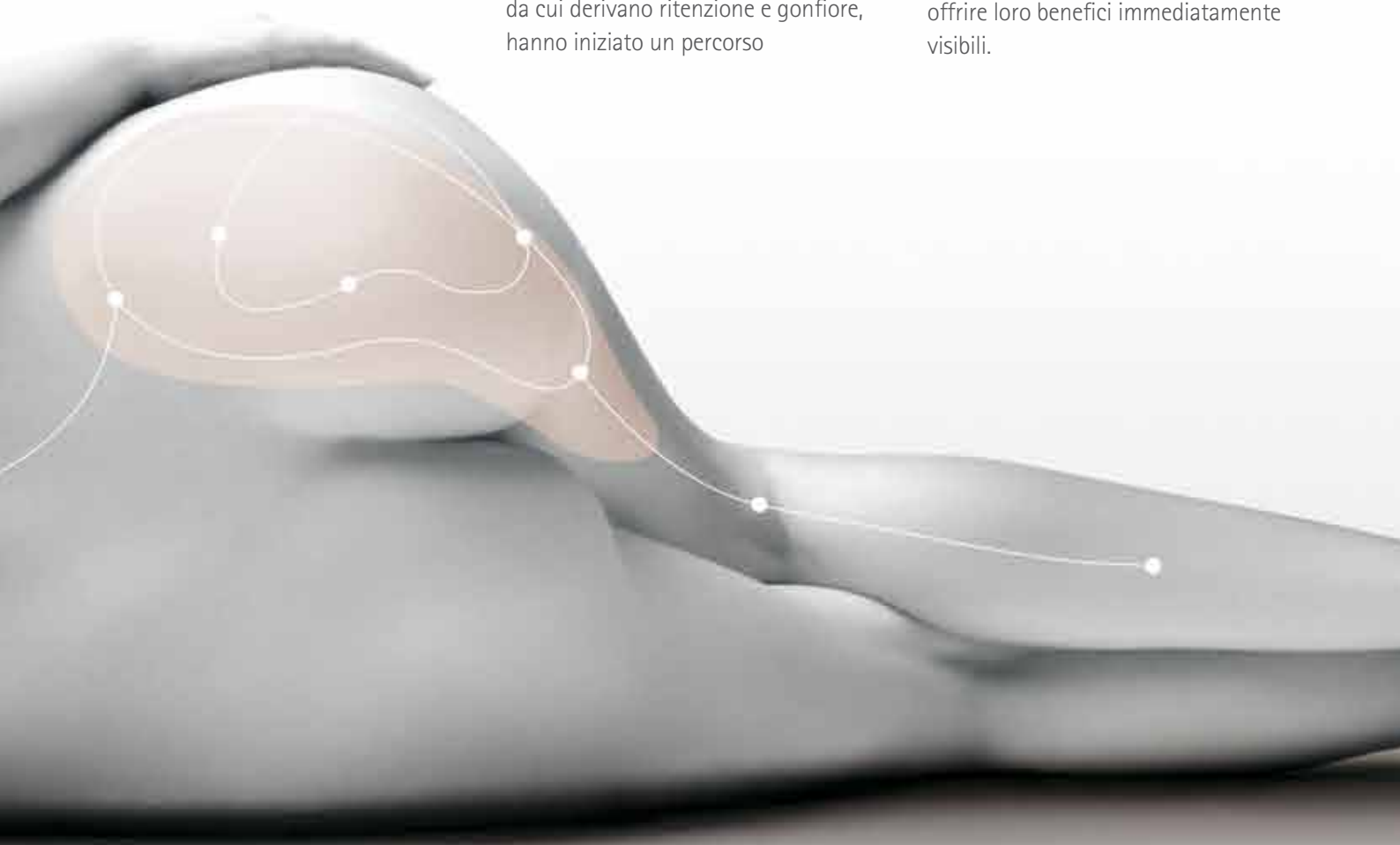

Cellutrim plus è efficace e sicuro.

PER IL SUO MECCANISMO D'AZIONE.

Cellutrim plus agisce in modo fisiologico con attivazione profonda e richiamo di energia dall'interno. L'incremento della temperatura locale endogena avviene senza surriscaldare i tessuti a livello cutaneo.

PER GLI STUDI CLINICI E SPERIMENTALI.

I principi di fisiologia e di fisica medica utilizzati da Cellutrim plus sono

gli stessi ampiamente sperimentati nel trattamento di numerose problematiche in ambito medico.

La sua efficacia e la sua sicurezza sono comprovate dall'utilizzo presso istituzioni mediche autorevoli e numerose università. Gli effetti su tessuti e sistemi biologici sono sempre documentati a livello scientifico tramite esami strumentali e biochimici. Ecco due esempi.

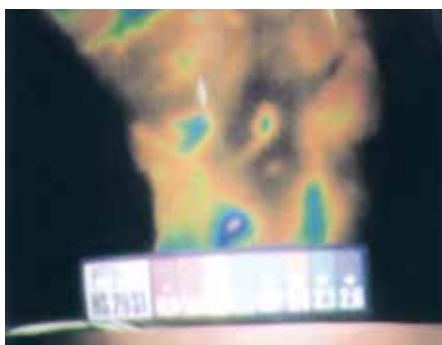


IMMAGINE TERMOGRAFICA

Prima del trattamento.

Si evidenziano in colore marrone le zone a ridotta temperatura, conseguente al microcircolo alterato.



IMMAGINE TERMOGRAFICA

Dopo il trattamento.

Si presentano in colore azzurro le stesse aree con temperatura aumentata grazie alla normalizzazione di microcircolo e ossigenazione.

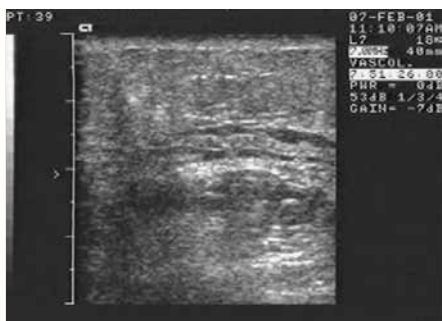


IMMAGINE ECOGRAFICA

Prima del trattamento.

Tessuto sottocutaneo disomogeneo e con fibrosi.

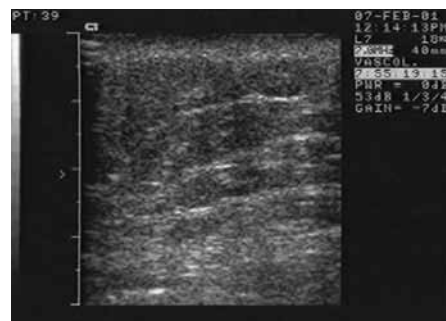


IMMAGINE ECOGRAFICA

Dopo il trattamento.

Tessuto sottocutaneo reso omogeneo dal trattamento, con netta riduzione dei tralci fibrotici.

Trattamenti mirati con la Scuola di Omeoenergetica.

Ogni persona è diversa dall'altra, e il suo organismo ha caratteristiche ed esigenze diverse. Per ottenere risultati più veloci ed efficaci è fondamentale saper offrire trattamenti personalizzati.

Presso la Scuola Internazionale di Omeoenergetica, potrai approfondire la conoscenza della tecnologia Cellutrim plus, delle più efficaci

tecniche manuali e dei prodotti più all'avanguardia.

Acquisirai protocolli che ti aiuteranno a studiare trattamenti ad hoc per ogni cliente.

Sarai in grado di valutare con precisione e competenza quale soluzione, caso per caso, è meglio adottare contro la cellulite.



omeoenergetica®

Beauty's just the beginning

Unibell Health & Beauty srl

Via Indipendenza, 27
23885 Calco (Lecco) Italia
Tel. +39 039 99 11 31
Fax +39 039 99 11 333
info@omeoenergetica.eu
www.omeoenergetica.eu



REF 12173